

Feuchtigkeitsspendende Lidhygienetücher mit Hyaluronsäure und Aloe Vera

Die sanfte Form der Lidhygiene

➔ REINIGT UND ERFRISCHT

Hyaluronsäure und Aloe Vera befeuchten, reinigen und erfrischen müde und gereizte Augen. Sie wirken feuchtigkeitsspendend und helfen bei der Entfernung von Ablagerungen und Make-Up.

➔ AUGENHYGIENE BEI BLEPHARITIS ODER POSTOPERATIV

ocuvers Wipes können bei zahlreichen Indikationen eingesetzt werden. Die antientzündliche Wirkung von Aloe Vera unterstützt die Behandlung von Blepharitis, Blepharoconjunctivitis oder allergisch bedingten Augenproblemen. Auch bei schuppiger Haut.

➔ SEHR GUTE VERTRÄGLICHKEIT

ocuvers Wipes sind hypoallergen und enthalten keine Konservierungsmittel oder Zusatzstoffe wie Phenoxyethanol, Benzalkoniumchlorid, Chlorhexidin, Thiomersal oder Parabene. ocuvers Wipes sind für Kontaktlinsenträger und Kinder geeignet.

pfliegend – erfrischend – hypoallergen

ocuvers
wipes

mit
Hyaluron-
säure und
Aloe Vera



**REINIGUNGSTÜCHER MIT
HYALURONSÄURE UND ALOE VERA.
HYPOALLERGEN.**

ocovers
wipes

ANWENDUNGSGEBIETE

- Tägliche Lidhygiene
- Befeuchtung und Pflege gereizter und müder Augen
- Augenreinigung bei entzündlichen Krankheiten wie z.B. Blepharitis oder Blepharoconjunctivitis
- Unterstützung der Behandlung bei allergisch bedingten Augenproblemen
- Entfernung von Make-Up
- Abschwellen verquollener Lider
- Reinigung empfindlicher Haut – auch bei Kindern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lidhygienetücher getränkt mit Hyaluronsäure und Aloe Vera
- Aloe Vera ist pflanzlich und hat entzündungshemmende Eigenschaften
- Jedes Reinigungstuch ist einzeln verpackt und daher sehr hygienisch
- Medizinprodukt – hergestellt unter pharmazeutischen Bedingungen

ANWENDUNG

Zur Pflege und Reinigung der Augen und Lidränder werden die Reinigungstücher am Oberlid von oben nach unten und auf dem Unterlid von unten nach oben zum Lidspalt hin angewendet. Im Anschluss erfolgt das Ausstreichen der Rückstände bzw. Ablagerungen jeweils in Richtung des Augenwinkels.

ZUSAMMENSETZUNG

- Hyaluronsäure
- Aloe Vera
- Auf den pH-Wert des Auges abgestimmt
- Enthält keine Konservierungsmittel wie Phenoxyethanol, Benzalkoniumchlorid, Chlorhexidin, Thiomersal oder Parabene

VERPACKUNGSGRÖSSE

Box mit 20 einzeln verpackten Einwegtüchern

FACTS

innomedis | AG
BETTER VISION
medical care
Postfach 501413
D-50974 Köln

Tel.: +49.221.4675445
Fax: +49.221.4675449
E-Mail: info@innomedis.com
www.innomedis.com